

AEC-Notrufmodul

Das AEC-Notrufmodul dient als Kommunikationsmodul zwischen dem ZOLL® AED 3 und hinterlegten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen von Kontaktpersonen oder Institutionen.



Die Kommunikation erfolgt hierbei auf unterschiedlichen Wegen:

- Das AEC-Notrufmodul baut automatisch eine Notfallsprechverbindung zum von Ihnen hinterlegten Kontakt auf. Geschultes Personal kann Sie somit im Notfall unterstützen.
- Wird der Wandschrank geöffnet und der ZOLL® AED 3 entwendet oder gibt es einen Stromausfall? Das AEC-Notrufmodul benachrichtigt Sie in allen wichtigen Fällen.
- Möchten Sie wissen, wie es um den Status des AEC-Notrufmoduls und des AEDs steht? Nutzen Sie die einfache Statusabfrage per SMS.

- Hat jemand Ihren AED entwendet und Sie möchten wissen wo sich Ihr Gerät befindet? Das interne GPS-Trackingsystem sendet Ihnen bei Wunsch die derzeitigen GPS-Daten Ihres Gerätes.

Wann meldet sich das AEC-Notrufmodul bei den hinterlegten Kontakten?

- Jemand hat den Wandschrank des ZOLL® AED 3 geöffnet
- Ihr ZOLL® AED 3 wurde entnommen
- Nach Entnahme des AED werden GPS-Daten in einem einstellbaren Zeitintervall versendet
- Bei Über- bzw. Unterschreitung der Grenzwerte für die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Konfigurieren Sie ganz einfach Ihre Notfallkontakte per USB!

! WICHTIG !

-

Das AEC-Notrufmodul ist nur für die Verwendung mit einem ZOLL® AED 3 vorgesehen

Bestellnummer AEC Modul: BE-AECM-AED3

Optimiert wurde das AEC-Notrufmodul für den Einsatz in Verbindung mit dem Wandschrank SIXCASE 1330 mit 5V USB-Versorgung

Bestellnummer Wandschrank: SIX-SC1330-AEC



SIM Spezifikationen:

Micro SIM (3FF')

Sprachpaket Notruf frei/ zu anderen Nummern je nach Nutzung

Datenpaket 5 mb/ Monat

SMS Paket nur bei Nutzung für Statusmeldungen

Z.B.falls genutzt bei Stromausfall je 2 Event

Oder

Bei GPS Tracking z.B. Alle 30 Sekunden (Zeit einstellbar)

Im besten Fall 0 SMS/Jahr